

# Face Shield

## Enthalten



## Was Sie zusätzlich benötigen

- Folien (Din A4)
- Locher

## Anleitung

### 1. Vorbereitung der Folie

Stellen Sie den Locher auf "888" und lochen Sie die Folie im Hochformat zwei Mal entlang derselben Kante.



### 2. Größe anpassen

Sie können die Breite durch biegen ändern und den Bügel verstellen, um das Face Shield perfekt an Ihre Kopfform anzupassen.



### 3. Folie anbringen

Die Folie in die Haken schieben.

Blieben Sie gesund.



Videoanleitung hier zu finden

